

Витректоры офтальмологические с двойным циклом


AKTive[®]
ITALY
Ophthalmic Instruments

Технология «двойного реза»

Калибры 20 G, 23 G, 25 G, 27 G

Совместимость с большинством хирургических аппаратов

Подходят для передней и задней витрэктомии

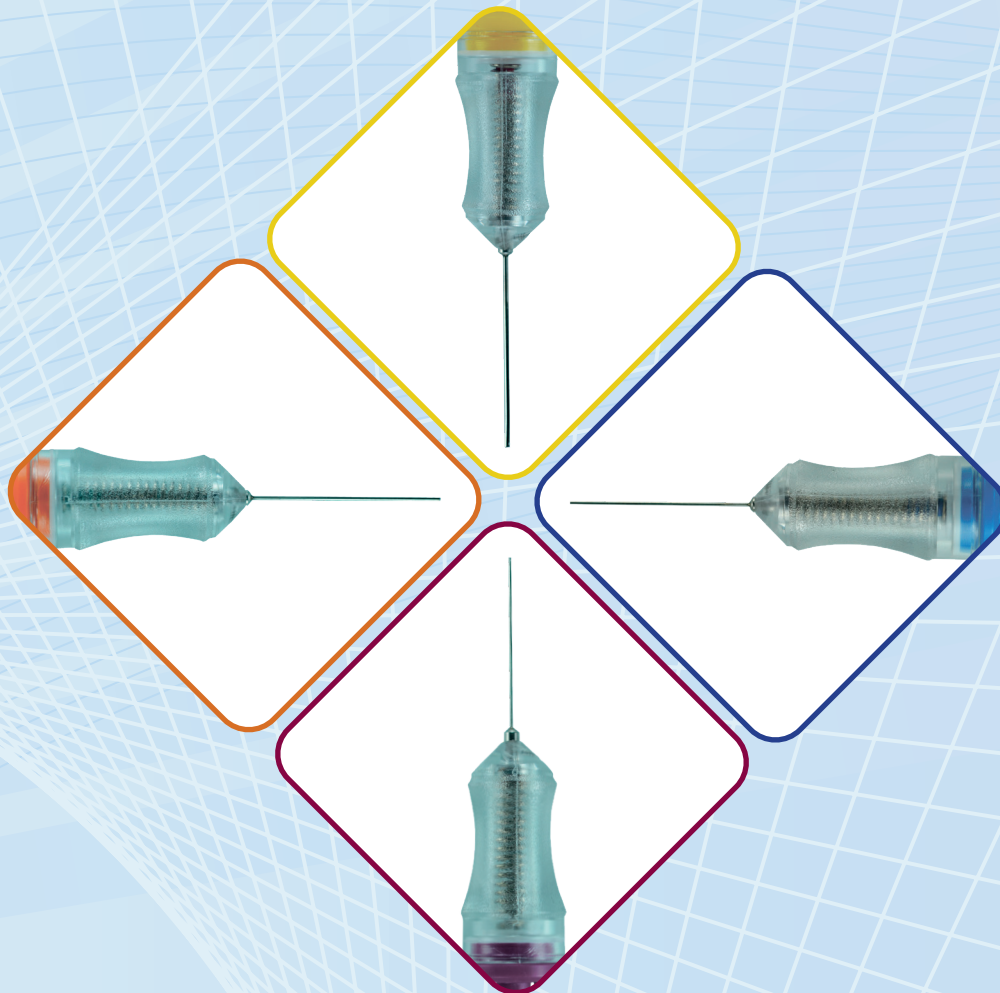

20G


23G

25G

27G

Преимущества технологии «двойного реза»

- ◇ Повышенная эффективность работы¹
- ◇ Независимость аспирации от частоты резов²
- ◇ Минимизация рисков ятрогенных разрывов за счет снижения пульсаций³
- ◇ Порт всегда открыт

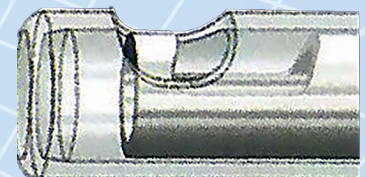

^{1,2} Valeri Kolesnitchenko; Matt Hanlon; David Flieg; George Lau. ARVO Annual Meeting Abstract | June 2020. Comparative analysis of water and vitreous flow rates with single and dual cutting guillotine style vitrectors of various gauges. <https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2770070>

^{1,3} Oravec, R., Uthoff, D., Schrage, N. et al. Comparison of modern high-speed vitrectomy systems and the advantages of using dual-bladed probes. Int J Retin Vitro 7, 8 (2021). <https://doi.org/10.1186/s40942-020-00277-2> | <https://journalretinavitroeu.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40942-020-00277-2#citeas>

Закажите апробацию

+7 (916) 765 00 53 | info@surgix.ru



Эксперт в поставке материалов для офтальмологии. Проверен временем.

Дистрибьютор ООО "Серджикс" 129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 18, стр. 1

info@surgix.ru | www.surgix.ru | +7 (495) 543 74 73

Surgix

ophthalmic surgical products

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТРЫ	20 G	23 G	25 G	27 G
Диаметр, мм	0.9	0.7	0.5	0.4
Положение порта от дистальной части, мм	0.4	0.35	0.25	0.2
Ширина порта, мм	0.48	0.35	0.33	0.26
Длина порта, мм	0.62	0.41	0.35	0.31
Режим	Передняя/Задняя			
Частота резов	2 x максимальная частота Вашего прибора*			
Длина зонда, мм	32	32	32	32
Совместимость	с большинством популярных хирургических аппаратов			
	О совместимости конкретных моделей уточняйте у представителя компании «Серджикс»			

*Максимальная частота резов витректора - удвоенная частота резов прибора.

Рекомендованные настройки при работе с витректором с двойным циклом - максимальная частота резов (фикс.), линейное изменение вакуума (0-макс).

СОВМЕСТИМОСТЬ

Коннектор А	Коннектор В	Коннектор С	Коннектор D	Коннектор Е	Коннектор F	Коннектор G
						

Информация предназначена для медицинских работников. AKtive® является торговой маркой AKtive®. РУ № РЗН 2021/14037 от 16.04.2021

Закажите апробацию

+7 (916) 765 00 53 | info@surgix.ru



Эксперт в поставке материалов для офтальмологии. Проверен временем.
Дистрибьютор ООО "Серджикс" 129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 18, стр. 1
info@surgix.ru | www.surgix.ru | +7 (495) 543 74 73

Surgix
ophthalmic surgical products